



Konvertierung der Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen
mit der Ortho-Cast M-Series Konvertierzange.

Ortho-Cast M-Series

Die Bukkalröhrchen-Serie der Extraklasse.



● **Ortho-Cast M-Series**
nicht konvertierbar



Einfachvierkant
Doppelvierkant

● **Ortho-Cast M-Series**
konvertierbar



Einfachvierkant
Doppelvierkant

● **Ortho-Cast M-Series**
konvertierbar



Zweifach-
kombination
Dreifach-
kombination

● **Ortho-Cast M-Series mini**
nicht konvertierbar



Einfachvierkant

Perfekt in Funktion und Design.

Genau wie die Dentaurum-Brackets werden auch die Bukkalröhrchen in modernsten Konstruktions- und Produktionsverfahren hergestellt.

Die Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen bieten dem Anwender viele Features für ein einfaches und sicheres Handling. Zudem hat der Behandler maximale Wahlfreiheit für seine individuelle Behandlung: Ortho-Cast M-Series einfach- oder doppelvierkant, konvertierbar oder nicht konvertierbar, für die Adhäsiv- und Bandtechnik.

- Neu: Zweifachkombination und Dreifachkombination, konvertierbar für die Bandtechnik.
- Echtes Ein-Stück-Bukkalröhrchen für hohe Biokompatibilität.
- Laserstrukturierte 3D-Basis für perfekten Halt und optimalen Sitz.
- Kennzeichnung + (OK) / - (UK) und FDI-Kennzeichnung bei Adhäsivtechnik für einfache Zuordnung zum Zahn.
- Biegbare Kugelkopfhäkchen für volle Flexibilität in der individuellen Gestaltung der Behandlung.



Zubehör





Optimales Konvertieren
mit der perfekt abgestimmten Konvertierzange
(REF 003-805-00).




Einfaches Ablösen des Konvertierdeckels
mit der Weingart Universalzange
(REF 003-120-00).


1. Konvertierung der Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen, am Beispiel* der Dreifachkombination, OK, Bandtechnik

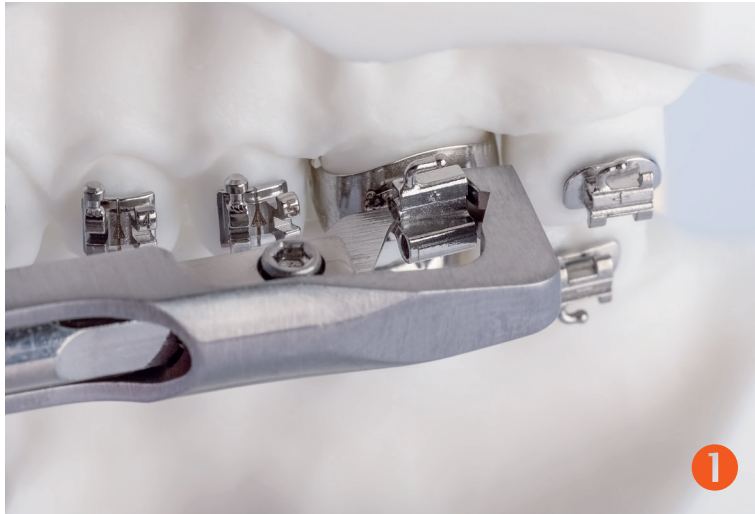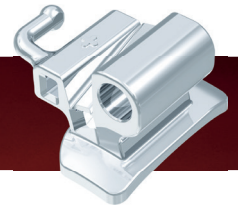

Konvertierzange (REF 003-805-00) locker angesetzt, Klinge mesial im Slot, geöffnete Zange distal hinter dem Bukkalröhrchen auf dem Band abgestützt.

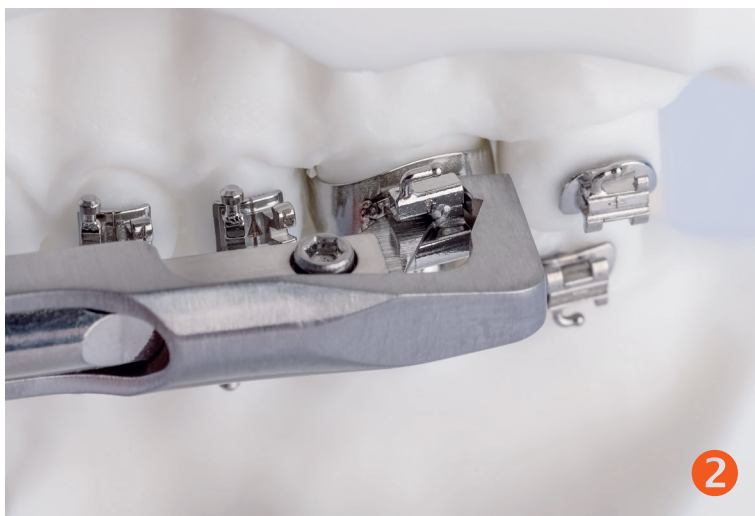


Konvertierzange mit leichter Kraft zgedrückt bis der Slotdeckel zur Hälfte gelöst ist.

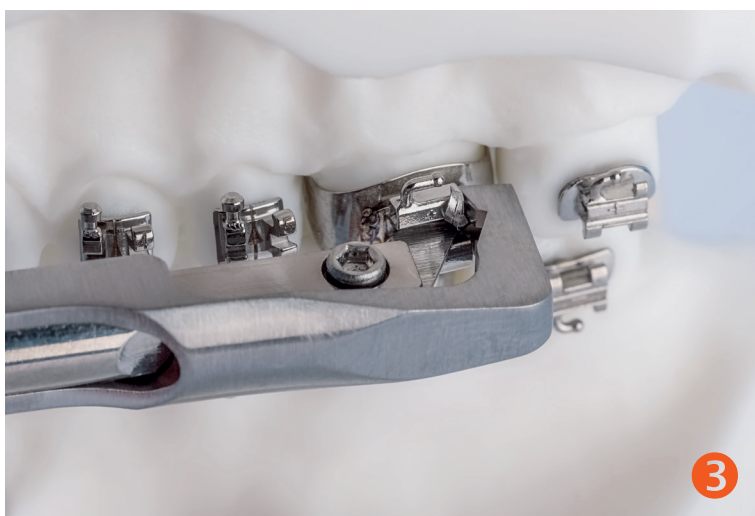

Konvertierzange vollständig zgedrückt und den Slotdeckel abgelöst.

* Konvertierung aller konvertierbaren Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen mit der Konvertierzange REF 003-805-00 möglich.

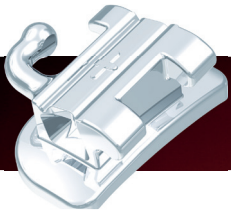

2. Troubleshooting am Beispiel eines Ortho-Cast M-Series einfachvierkant Bukkalröhrchens, OK, Adhäsivtechnik



Konvertierzange locker angesetzt, Klinge mesial im Slot, geöffnete Zange distal hinter dem Bukkalröhrchen auf der Basis abgestützt.



Konvertierzange mit leichter Kraft zugeedrückt bis der Slotdeckel zur Hälfte gelöst ist.



Konvertierzange vollständig zugeedrückt, Slotdeckel nicht ganz abgelöst.



Die Konvertierzange konnte den Slotdeckel nur einseitig vom Körper ablösen.



Der einseitig abgelöste und leicht absteigende Slotdeckel wird z.B. mit einer Weingartzange (REF 003-120-00) gegriffen ...



... und vollständig abgelöst.

Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

KUNDENSERVICE

+ 49 72 31 / 803 - Durchwahl

Festsitzende Technik -550
Herausnehmbare Technik -555
Digitale KFO -280
Auftragsannahme -210

Faxbestellung 0800 / 4 14 24 34
(gebührenfrei aus Deutschland)



ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Stand der Information: 10/19
Änderungen vorbehalten

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Telefon +49 72 31 / 803 - 0 | Fax +49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com