

Protocolo de fresado.

Protocolo de fresado con fresas CITO mini®.
Considerando diferentes calidades óseas.

Dependiendo de la indicación y la situación inicial del paciente se adapta el protocolo de fresado. La inserción de CITO mini® implantes en hueso blando **no** está indicada.


CITO mini®



Calidad ósea blanda

Calidad ósea media

Calidad ósea dura

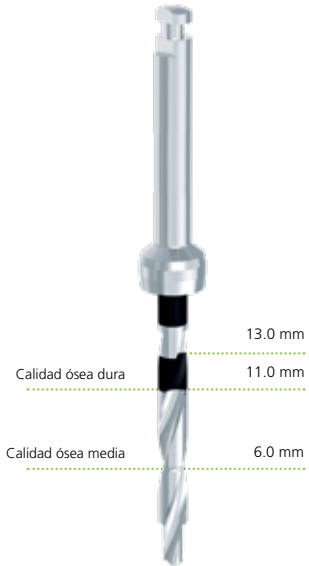

Fresa esférica²



Fresa escalonada para Ø 1.8 mm¹



Fresa escalonada para Ø 2.2 mm¹



Fresa escalonada para Ø 2.5 mm¹



La inserción de implantes CITO mini® en hueso blando **no** está indicada.

mín.
6.0 mm

mín.
6.0 mm

mín.
6.0 mm

¹ La profundidad de la inserción/longitud de la fresa escalonada dependen de la deseada estabilidad primaria y la calidad ósea. Las marcas/escalas de profundidad ayudan a evitar daños de estructuras vecinas (p. ej., nervios) debido a perforaciones demasiado profundas.
² Uso opcional.
³ No previsto para restauraciones en el maxilar superior.
⁴ En caso de hueso muy duro puede ser necesario usar una fresa escalonada del siguiente tamaño mayor para ampliar el hueso cortical.

→ www.dentaurum.com/ifu