

remanium®  
*star powder* 

# RISING STAR

L'alliage revisité

Coulée sur modèle


Recommandation de modelage

  
DENTAURUM

# Coulée sur modèle

## Auxiliaire de modelage


Toutes les indications correspondent à ou se basent sur des valeurs tirées de la littérature spécialisée. Dans certains cas – en fonction de la conception de l'armature et des caractéristiques de l'alliage – des écarts de longueur et de largeur sont nécessaires.

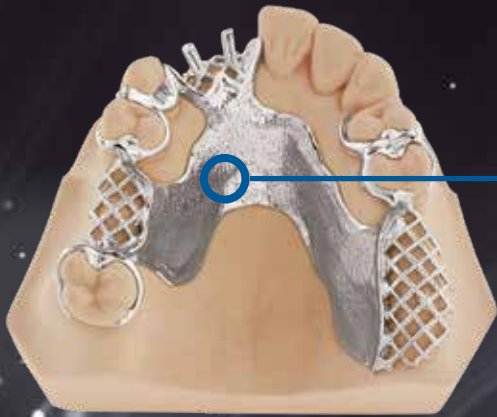

Épaisseur de la plaque-base 0,6 mm – 0,8 mm, avec ou sans grains

### Paramètres de base :


- Crochet préformé 1,5 mm (épaisseur du crochet) – 2,0 mm (largeur du crochet) ou tel que défini dans le système
- La pointe du crochet peut être réduite à 1,2 mm – 1,5 mm
- Fusion généreuse de toutes les pièces vers le point d'attache (du crochet à la rétention, tiges de rétention)
- Lisser les bords et les inégalités
- Planifier les éléments à fabriquer avec le fabricant

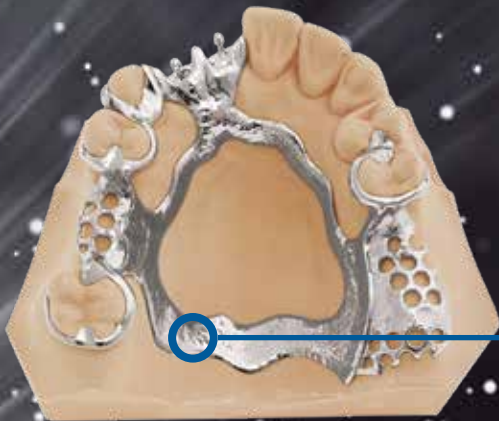

Plaque squelettée 0,6 mm x 5 mm – 0,8 mm x 5 mm



Le bandeau transversal ne doit pas être inférieur à 10 mm pour une épaisseur de 0,6 mm

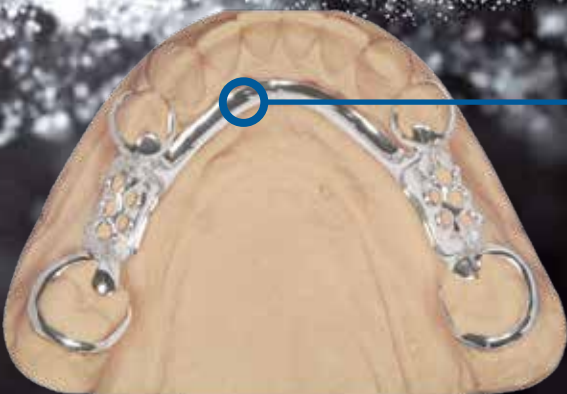

Barre préformée sublinguale  
2,0 mm – 2,3 mm x 4,0 mm – 4,3 mm