

remanium®
star powder 

RISING STAR

Redescubriendo la aleación

Esqueléticos


Recomendaciones
para la modelación


DENTALURUM

Esqueléticos

Ayuda para la modelación

Todos los datos corresponden a/se basan en los valores indicados en la literatura técnica. En casos individuales – en relación con el diseño de la estructura y las propiedades de la aleación- son necesarias desviaciones en la anchura y la longitud.

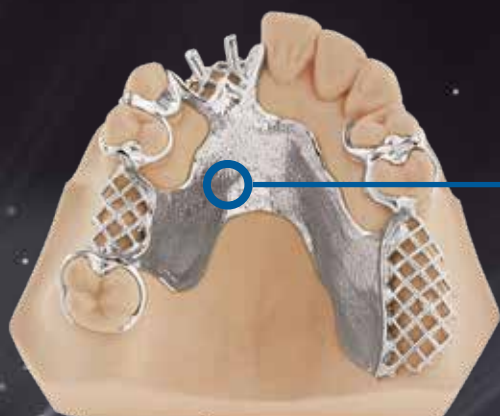

Espesor del panel base 0,6 mm - 0,8 mm,
con o sin veteado

Parámetros básicos:


- Perfil del gancho 1,5 mm (espesor del gancho) - 2,0 mm (anchura del gancho) o según lo escrito en el sistema
- La punta del gancho se puede estrechar hasta 1,2 mm - 1,5 mm
- Fusión generosa de todos los componentes hacia el conector (desde el gancho hasta la retención, pines de retención)
- Alisar bordes y desniveles
- Coordinar los elementos de la producción con el fabricante



Placa esqueletizada 0,6 mm x 5 mm - 0,8 mm x 5 mm



La banda transversal no debe ser inferior a 10 mm
con un espesor de 0,6 mm

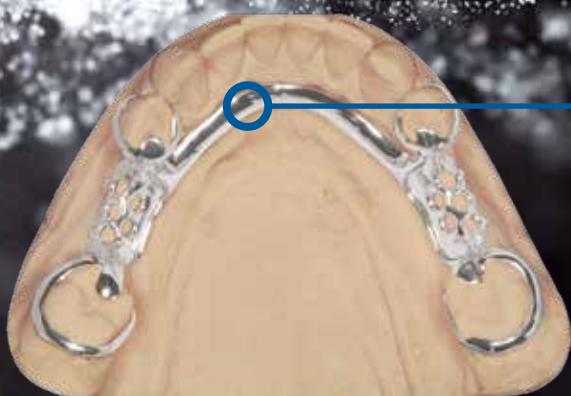

Perfil de la barra sublingual
2,0 mm - 2,3 mm x 4,0 mm - 4,3 mm